



Опоры-ходунки
R Wheel, R Duo, R Kid
Руководство по эксплуатации



СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Технические характеристики.....	3
1.3 Упаковка.....	4
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	4
2.1 Важные предупреждения.....	4
2.2 Порядок работы.....	4
2.3. Пересадка с кресло-коляски на опоры-ходунки.....	5
2.4. Передвижение на опорах-ходунках.....	6
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	7
4 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	8
Приложение 1. Декларация о соответствии.....	10

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик опор-ходунков R Wheel, R Kid, R Duo.

Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

1. описание и работа

1.1 Назначение

Опоры-ходунки R Wheel, R Kid, R Duo предназначены для облегчения передвижения людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и координации движения.

1.2 Технические характеристики

механизм	складной	все модели
материал	алюминий	все модели
шаг регулировки высоты, см	2,5	все модели
конструкция	“без шага”	R Duo, R Kid
	“с шагом/ без шага”	R Wheel
фиксирующий замок	одинарный	R Wheel
особенность	детские, регулируются под рост 100-130 см	R Kid
	с сиденьем	R Duo
производство	Китай	все модели
гарантия	6 мес.	все модели

1.3 Упаковка

В комплектации: ходунки, руководство по эксплуатации.



2. использование по назначению

2.1 Важные предупреждения:

- Протирайте изделие мягким моющим средством и водой, затем высушите.
- Убедитесь, что все балки надежно закреплены.
- Максимальная нагрузка на изделие не должно превышать 100 кг.

2.2 Порядок работы

Ходунки продаются в собранном виде.

1. Вытащите изделие из коробки.
2. Поверните обе стороны ходунков, пока не услышите характерный щелчок (Модель R Wheel) или раскройте перед-

ную и заднюю стороны ходунков (Модели R Duo, R Kid).

3. Отрегулируйте высоту ходунков. Убедитесь, что ножки ходунков находятся на одинаковой высоте. Медные фиксирующие шарики должны полностью выскочить из отверстий.

4. Чтобы сложить ходунки, необходимо нажать на фиксирующий замок и повернуть обе стороны ходунков внутрь (Модель R Wheel) или же просто сложить переднюю и заднюю стороны ходунков (Модели R Duo, R Kid).


Расположите ходунки на желаемой дистанции от вас. Используя свои руки как опоры, продвиньтесь ближе к раме ходунков. Не подходите слишком близко к передней раме ходунков, это может вызвать потерю равновесия. Потихоньку продвигайтесь вперед мелкими шагами.

Чтобы сесть, продвиньтесь назад, пока ваши ноги не коснутся сиденья. Одной рукой нащупайте сиденье, а другой держитесь за ходунки.

Чтобы встать из положения сидя, оттолкнитесь руками от сиденья и затем возьмитесь за ходунки.

2.3. Пересадка с кресло-коляски на опоры-ходунки

Убедитесь, что колеса вашей кресло-коляски стоят на тормозах. Поднимитесь с кресло-коляски, опираясь на подлокотник одной рукой и, держась за ходунки другой рукой (попросите помощь сопровождающего лица, если необходимо).

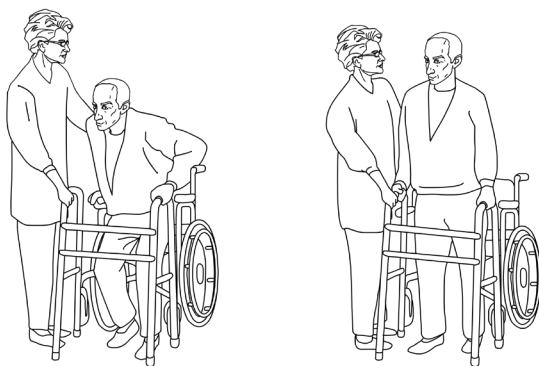

Пересадка с кресло-коляски на опоры-ходунки, в случае травмы правой ноги
Убедитесь, что колеса вашей кресло-коляски стоят на тормозах. Поднимитесь с кресло-коляски. Для этого положите левую руку на опоры-ходунки, следом

положите правую руку на опоры-ходунки. В случае травмы левой ноги, положите сначала правую руку, а затем левую руку на опоры-ходунки.

2.4. Передвижение на опорах-ходунках:

1. Встаньте перед ходунками так, чтобы ножки опор-ходунков доходили до середины ваших ног.



2. Поднимите опоры-ходунки и поставьте их перед собой. Убедитесь, что все ножки опор-ходунков плотно прилегают к полу. Сделайте шаг.



3. Осторожно передвигайтесь вперед по одному шагу.



3. техническое обслуживание

Перед использованием проверьте, чтобы резиновые насадки не были порваны, изношены или утеряны. Замените насадки в случае необходимости.

4. условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул.Новопоселковая, д.6

Серийный № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ место печати, штампа

(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)

Опоры-ходунки R Wheel, R Duo, R Kid

Производитель: Foshan Dayang Medical Technology Co., Ltd.,

Китай

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6

Тел./факс : (495) 792-31-90

(800) 200-31-90;

www.sims2.ru



Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца _____ М.П.

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

Приложение 1

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ООО "СИМС-2"

наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принимающих декларацию о соответствии

Зарегистрировано Филиал № 2 Московской регистрационной палатой 15 апреля 1999 года,
ОГРН 1027739438902

адреса и регистрационные номера или индивидуального предпринимателя (обозначение регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

ул. Новоселковская, дом 6, г. Москва, 125363, телефон (495) 792-31-90, факс (495) 792-31-90, E-mail
info@sims2.ru

адрес, телефон, факс

в лице генерального директора С. П. Бадаляна

должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация

заявляет, что

Ходунки на колесах серии R, ходунки на колесах, модели: R Wheel, R Duo, R Kid, R Push, R Quattro,
R Trio, R Drive, R Euro

наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация

Серийный выпуск

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная)

Изготовитель Foshan Dayang Medical Technology Co., Ltd.

наименование изготовителя

Xingxian Development Zone., Changhongling Industrial Park, (2nd period), Dali, Nanhai District, Foshan
City, Китай, 528234. Тел. +86-757-81821201, +86-757-81821202, +86-757-81821203

страны и т.п.

Код ОК 005-93 (ОКП): 94 5150

Код ТН ВЭД России: 9021 10 100 0

соответствует требованиям

ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 51080-97, ГОСТ Р 51632-2000

обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции

Декларация принята на основании

Протокол испытаний № 12.1668ПТИ/2011 от 19 июля 2011 года Испытательный лабораторный
центр ФГУ "НИИ ФХМ" ФМБА России, рег. № РОСС RU.0001.21ИМЗ3

Протокол испытаний № № 5524.011 от 15 июля 2011 года Испытательный лабораторный центр
ФГУ "НИИ ФХМ" ФМБА России, рег. № РОСС RU.0001.21ИМЗ3

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10855 от 18 ноября 2011 года, срок действия не
ограничен

информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации

Дата принятия декларации: 25.07.2012

Декларация о соответствии действительна до: 25.07.2015

М.П. «СИМС-2»

«SIMS-2»

подпись

Генеральный директор

С. П. Бадалян

инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии
ОРГАННО-СЕРТИФИКАЦИИ "ЭНЕРГИЯ ПЛЮС"

наименование и адрес органа по сертификации, зарегистрировавшего декларацию

Ул. Сосновая аллея, д. 6, офис 6, г. Королев, Московской обл., 141075, тел./факс (495) 502-888-1, 502-888-2,
502-888-9, <http://www.1011455.ru>

Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ИМ25 выдан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

Дата регистрации 25.07.2012, регистрационный номер декларации РОСС CN.ИМ25.Д07499

дата регистрации и регистрационный номер декларации

М.П.



подпись

Н.П. Шандова

инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации

№ 003352

Для заметок